

145mm

Modell: TF-9006

Effektive  
Atemschutzmaske

90mm

90mm

145mm

90mm

Anweisungen

**Kategorie:** Atemschutzmaske ohne Ventil.  
**Spezifikation:** FFP2 NR Geprüft nach EN149:2001 + A1:2009 - Einheitsgröße.  
**Material:** non-woven fabric, Hot-Air Cotton, Meltblown.  
**Chargennummer:**   
**Produktionsdatum:**   
**Haltbarkeit:** 3 Jahre  
**Ausführungsstandards:** EN149: 2001 + A1: 2009 FFP2 NR  
**Lagerbedingungen:** Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht, Luftfeuchtigkeit <80%, kein ätzendes Gas, lagern Sie es im Reinraum mit guter Belüftung.

<b>Hersteller:</b> Tengfei Technology Co., Ltd. <b>MADE IN CHINA</b>	<b>Address:</b> No.111 Tongqiu Road, Zhangpu Town, Kunshan City, Jiangsu Province. <b>Importeur:</b> NEUKOOR GmbH, Schweppermannstr. 70 90408 Nürnberg, Tel.: +49(0)1622105858 E-Mail: pei.pan@neukoor.de
--	---

Siehe die Informationen des Herstellers

der Temperaturbereich der Lagerbedingungen

-30°C +40°C

maximale relative Luftfeuchtigkeit der Lagerbedingungen

6 9 7 3 0 8 4 2 2 0 0 2 9



Effektive  
Atemschutzmaske

FFP2



20 St.



Produktinweise  
und Warnungen

Produktinweise

- Überprüfen Sie das Aussehen vor der Verwendung. Bitte nicht verwenden, wenn es beschädigt oder verschmutzt ist.
- Waschen, erhitzen oder desinfizieren Sie die Maske nicht.
- Berühren Sie beim Tragen nicht die innere Seite der Maske, um Verschmutzung zu vermeiden.
- Nicht verwenden, wenn nicht genügend Sauerstoff vorhanden ist.
- Wechseln Sie die Maske, wenn sie beschädigt ist oder einen unerwünschten Geruch aufweist.
- Nicht geeignet für: 1) Personen mit einem beeinträchtigten Atmungssystem wie Asthma oder Emphysem. 2) Patienten, die ihren Körperzustand oder ihre eigenen Hände nicht frei ausdrücken können.
- Es wird empfohlen, die Maske all vier Stunden zu wechseln.

Warnungen

- Wenn Sie die Maske falsch tragen, kann die Schutzwirkung nicht gewährleistet werden.
- Nehmen Sie die Maske ab, wenn Sie sich krank fühlen oder wenn Sie nicht genügend Luft bekommen.

Trageanleitung

Tragen Sie die Maske gemäß den folgenden Anweisungen, um die beste Schutzwirkung zu erzielen.

1. Nehmen Sie die Maske heraus und berühren Sie nicht die innere Seite.
2. Falten Sie die Maske auf und legen Sie sie auf Ihr Gesicht.
3. Passen Sie die elastischen Ohrbänder an Ihre Ohren an.
4. Passen Sie die Position der Nasenschiene an.



Effektive  
Atemschutzmaske

FFP2



20 St.



130mm